

# TUTO<sup>+</sup>



## LA PRISE DE SANG



# A2B Medical

**A2B MEDICAL** vous accompagne en mettant à disposition des **guides et livrets pratiques** afin de vous aider à choisir et utiliser votre matériel avec **efficacité, sécurité et précision.**



## TUTORIEL N° 1 - LA PRISE DE SANG

[www.a2b-medical.com](http://www.a2b-medical.com)



## LISTE DU MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Avec les produits A2B MEDICAL



Une boîte de gants



Un garrot réutilisable



Aiguille adaptée



Lingettes alcoolisées



Tubes de prélèvement



Corps de prélèvement



Compresse stériles



Sparadrap



Conteneur DASRI



### 1

## PRÉPARATION ET IDENTITOVIGILANCE



- Se **laver soigneusement les mains** et préparer tout le matériel.
- Vérifier **l'identité du patient**, son ordonnance, et s'assurer des conditions de prélèvement : jeûne, prise de médicaments, heure de la dernière prise, état de repos, antécédents médicaux.
- Expliquer le geste au patient pour **le rassurer et réduire son anxiété**.

### 2

## INSTALLATION DU PATIENT



- **Installer le patient** confortablement
- Choisir le bras et **repérer une veine** (généralement la veine médiane du pli du coude).
- Poser le garrot réutilisable **à environ 5-10 cm au-dessus du site**, sans dépasser une minute.
- **Désinfecter la zone** avec une lingette alcool isopropylique 70%.





### 3

### LE PRÉLÈVEMENT



- Insérer **l'aiguille vers le haut** à environ 30 degrés
- **Connecter le corps de prélèvement** puis insérer les tubes.
- Remplir les tubes **dans l'ordre prescrit** (plus d'informations sur l'ordre de remplissage sur le site A2B Medical).
- **Desserrer** le garrot
- Retirer **délicatement l'aiguille et comprimer immédiatement** le site avec une compresse stérile.
- **Etiqueter les tubes** immédiatement avec l'identité du patient et les informations nécessaires.

### 4

### FINITION



- Appliquer un **pansement**
- **Éliminer le matériel** (aiguille, compresse souillée, tubes usagés) dans le conteneur DASRI.
- Noter **l'heure du prélèvement** dans le dossier patient.

